



IndiTreat® mCRC Extend

PACIENTES OBJETIVO

El análisis **IndiTreat® mCRC Extend** va dirigido a pacientes con cáncer colorrectal metastásico que muestran progreso del tumor después de al menos dos líneas previas de tratamiento sistémico. El objetivo del tratamiento farmacológico en estos pacientes no es curativo, sino paliativo, con la intención de prolongar la supervivencia y mejorar la calidad de vida.


DIRECTRICES DE TRATAMIENTO

Cuando un paciente muestra progreso de la enfermedad después de haber recibido una segunda línea de tratamiento, el oncólogo puede reintroducir (rechallenge) fármacos recomendados en primera línea (**FOLFOX**, **FOLFIRI** y **FOLFOXIRI**) o puede cambiar a un tratamiento según los fármacos recomendados como tercera línea en las directrices internacionales. Las directrices de la **ESMO** recomiendan dos opciones como tercera línea: el inhibidor de la quinasa multiobjetivo **regorafenib** o un agente oral que combine **trifluridina** y **tipiracil**.

RESULTADO DEL TRATAMIENTO

El resultado del tratamiento con **regorafenib** es moderado, con una supervivencia global de 6,5 meses, en comparación con 5,1 meses en el grupo de placebo (estudio CORRECT), mientras que para **trifluridina** + **tipiracil**, es de 7,1 meses, en comparación con 5,3 meses en el grupo de placebo (estudio RECURSE). Pero estos resultados son valores de mediana de los grupos de tratamiento, en los que la respuesta de los diferentes pacientes se encontrará dentro de un rango amplio. El problema es que no hay biomarcadores que permitan pronosticar dónde quedará la respuesta de un paciente concreto dentro de este rango. Otros problemas son que ambos tratamientos tienen unos efectos adversos considerables y son costosos.


SUPERVIVENCIA GLOBAL (MESES DESDE LA ALEATORIZACIÓN HASTA LA MUERTE)

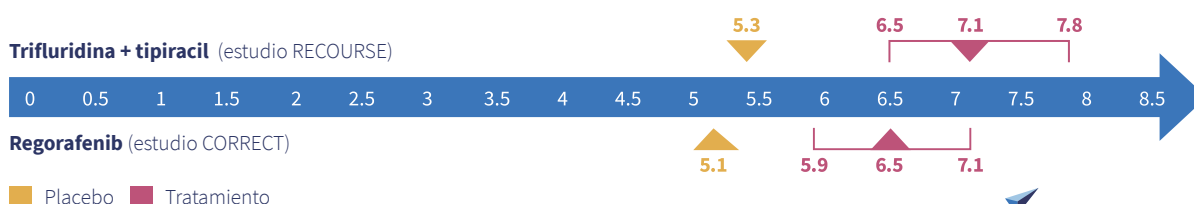

VALOR DEL TRATAMIENTO GUIADO

El valor único del análisis **IndiTreat®** es que se pronostica la respuesta individual del paciente en función de los tumoroides creados a partir de las células tumorales del propio paciente. Esto es importante para la práctica clínica, ya que a los pacientes con pocas probabilidades de responder al tratamiento se les puede evitar un tratamiento con molestos efectos adversos. Por otro lado, los pacientes que probablemente sí respondan pueden beneficiarse de una supervivencia global más prolongada que la supervivencia promedio documentada en los ensayos clínicos.

IndiTreat® mCRC Extend: PANEL DE FÁRMACOS	
Código para pedidos: 2CX-01-CRC-01	
FOLFOX	Regorafenib
FOLFIRI	Trifluridina + tipiracil
FOLFOXIRI	

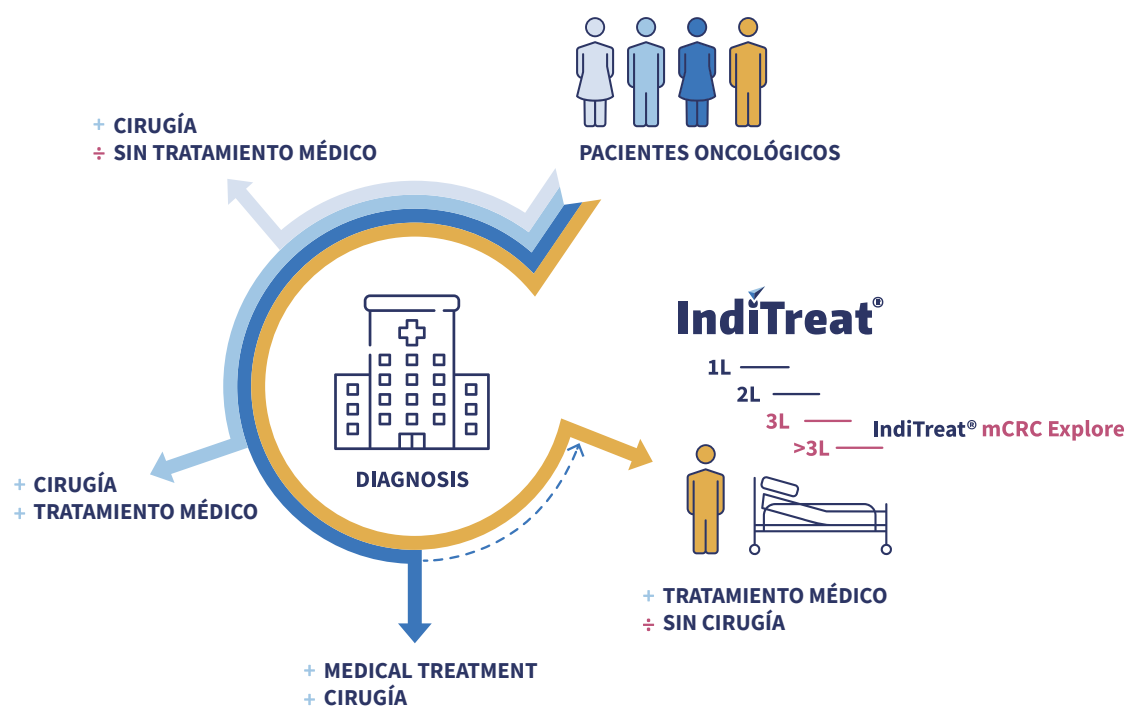

IndiTreat®
by 2cureX

2cureX

Fruebjergvej 3
2100 Copenhagen
Dinamarca

Mail: support@2curex.com
www.inditreat.com